

# Provtagning för rättsgenetisk faderskapsundersökning vid verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården


- Provet tas av en legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som kontrollerar provgivarens identitet och fyller i uppgifterna om provtagningen i handlingen **Handling över provtagning för rättsgenetisk faderskapsundersökning**. Hon/han också fyller i handlingen **Intyg över provtagning för rättsgenetisk faderskapsundersökning på förordnande av domstolen**.
- Provgivaren ska undvika att äta, dricka (utom vatten) och röka minst en halv timme före provtagningen.

**1** Ta två prover per person. Skriv provgivarens namn och personbeteckning tydligt med en kulspetspenna eller permanent tusch på två etiketter. Färgen på etiketternas kanter är blå för mannen, röda för modern och gula för barnet.

**2** Öppna två folieförpackningar och klistra etiketterna på provrörens vita korkar.



**3** Öppna ett provrör genom att dra i den vita korken (korken sitter hårt). Se till att provborsten inte rör vid något. Använd handskar.

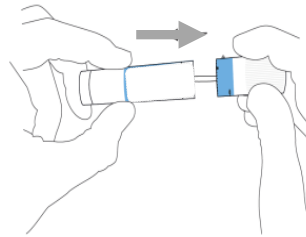

**4** Gnugga eller snurra provborsten stadigt mot insidan av provgivarens kind i cirka 10 sekunder och slut provborsten i sitt rör genast efter provtagningen. Se till att du inte trycker provborsten så hårt att skaftet går av (en sådan situation är mycket osannolik).

**5** Upprepa punkt 3 och 4 med den andra provborsten mot den andra kinden.

**6** Provrören och *Handlingen över provtagningen* förpackas i ett svarskuvert. *Intyg över provtagning* ges till provgivaren.

