



**Lähettäjä:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Näytteenottoaika: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Vastausosoite: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Tutkittava:**

Etunimi: \_\_\_\_\_  
Sukunimi: \_\_\_\_\_  
Henkilötunnus: \_\_\_\_\_  Mies  
\_\_\_\_\_  Nainen  
Lähettäjän näytteen numero: \_\_\_\_\_  
Näytteen numero: \_\_\_\_\_ (THL täyttää)  
Näyte saapunut THL:een \_\_\_\_\_ (THL täyttää)  
Henkilötietotarralle paikka kääntöpuolella =>

Lääkäri/hoitajan nimi: \_\_\_\_\_ Puhelinnumero: \_\_\_\_\_

**Näytteet:**

uloste pvm \_\_\_\_\_ Näytteen ottaja: \_\_\_\_\_

Norovirusinfektioiden seurantaan tulevat näytteet tutkitaan maksutta.

**Näytteenotto-ohjeet kääntöpuolella**



paikka henkilötietotarralle

**Norovirustutkimuksiin tarvittavat näytteet:**

Näytteet säilytetään n. +4 asteessa ja lähetetään mahdollisimman pian  
Virologian yksikköön.

Ulostenäytettä (n. 2g) norovirusosoitusta varten.

Näyte otetaan mahdollisimman pian oireiden alkamisen jälkeen.

Virusta voi erittyä pitkään, mutta oireiden loputtua negatiiviseksi jäävien näytteiden osuus kasvaa.

Lähete: ”Norovirusinfektion osoittamiseksi tarvittavien näytteiden lähetetiedot” -lomake (käännä)  
- täytä huolellisesti kaikki kohdat

Näytteiden lähetys: - pakkaa jokainen näyte omaan Minigrip-pussiin imutyynyn kanssa  
- pussit pakataan mielellään n. +4 asteen kylmäpakkaukseen  
- kylmäpakkaukseen pakataan keltamustaraidalliseen pahvilaatikkoon  
- laatikossa on oltava UN3373 sekä BIOLOGINEN MATERIAALI,  
KATEGORIA B -tarrat (perustuu kansainvälisiin sääntöihin)  
- lähettäjä maksaa postimaksun

*HUOM: Itella Oyj kuljettaa laatikot maksikirjeenä, ILMAN pakettikorttia*

Lähetysoite: THL  
Virologian yksikkö / NORO  
PL 30  
00271 HELSINKI

Tulokset: - tulokset vastataan kirjallisesti