

Ohje oikeustoksikologian näytteiden tarroittamiseen ja lähettämiseen

Ohje työpaikan huume-testausnäytteenottajalle/ lähettäjälle:

1. Analysoitava virtsanäyte jaetaan kahteen keltakorkkiseen näyteputkeen, jotka sinetöidään A- ja B-sinettitarroilla.
2. **Työpaikan huume-testausnäytteille** käytetään niille tarkoitettuja THL:n tapaus- ja näytetarroja, joissa on tapausnumeron edessä lyhenne **TP**. Muita tapaustarroja ei saa käyttää työpaikkatestausnäytteille. (S-tarrat on tarkoitettu muille kuin työpaikkatestausnäytteille, esim. sairaalan huume-testausnäytteille.)
3. A-sinetillä merkittyyn putkeen näytteenottaja laittaa 001-loppuisen näytetarran ja B-sinetillä merkittyyn putkeen 002-loppuisen näytetarran. Näytetarra liimataan pystysuuntaan, jotta viivakoodi on luettavissa koneellisesti. Näytetarran päälle ei saa liimata muita tarroja, jotka peittävät viivakoodin.
4. Läheteeseen liimataan tapaustarra, jossa on sama tapaustunnus kuin näytetarroissa, mutta ilman -001 tai -002 -päätettä.
5. Molemmat näytteet (A,B) ja paperinen lähete lähetetään keltamustaraidallisessa laatikossa THL:een oikeuskemiayksikköön.

Ystävällisin terveisin,

Oikeuskemiayksikkö, oikeustoksikologia

www.thl.fi/paihdeaaritukset

Kirjaus