

Anvisning om märkning och sändning av prover inom rättstoxikologin

Anvisningar till den som tar/skickar prover för narkotikatest på arbetsplatsen:

1. Fördela urinprovet som ska analyseras i två provrör med gul kork och försegla dem med A- och B-sigilletiketter.
2. **Till prover för narkotikatest på arbetsplatsen** används THL:s fall- och sigilletiketter som är avsedda för detta syfte och som framför fallnumret har förkortningen **TP**. Andra falletiketter får inte användas till prover som tas på arbetsplatsen. (S-etiketterna är avsedda för andra prover än de som tas på arbetsplatsen, till exempel prover för narkotikatest på sjukhus.)
3. Fäst provetiketten med slutsiffrorna 001 på ett rör märkt med A-sigill och provetiketten med slutsiffrorna 002 på ett rör märkt med B-sigill. Fäst provetiketten vertikalt så att streckkoden kan läsas maskinellt. Andra etiketter får inte fästas på provetiketten så att de täcker streckkoden.
4. På remissen fäster du en falletikett med samma fallkod som på provetiketterna men utan slutsiffrorna 001 eller 002.
5. Skicka båda proverna (A, B) och remissen i pappersform i en gul- och svartrandig kartong till enheten för rättskemi vid THL.

Rättskemi

www.thl.fi/paihdeaaritykset