

**Lähettäjä**

Näytteenottoaika
Vastausosoite (sähköposti)

**Tutkittava**

Etunimi	
Sukunimi	
Henkilötunnus	<input type="checkbox"/> Mies <input type="checkbox"/> Nainen
Lähettäjän näytteen numero	
Näytteen numero	(THL täyttää)
Näyte saapunut THL:ään	(THL täyttää)

**Lääkäri/hoitaja**

Nimi	Puhelinnumero
------	---------------

**Näytteet**

<input type="checkbox"/> Uloste	pvm _____
---------------------------------	-----------

## Norovirustutkimuksiin tarvittavat näytteet

- Ulostenäytettä (n. 2 g) norovirusosoitusta varten.
- Näyte otetaan mahdollisimman pian oireiden alkamisen jälkeen.
- Virusta voi erittyä pitkään, mutta oireiden loputtua negatiiviseksi jäävien näytteiden osuus kasvaa.
- Näytteet säilytetään n. + 4 asteessa ja lähetetään mahdollisimman pian Virologian laboratorioon.

Henkilötietotarra

## Lähete

- Norovirus-lähetelomake
- Täytä huolellisesti kaikki kohdat
- Täytä jokaiselle näytteelle oma lähete

## Näytteiden lähetys

1. Pakkaa jokainen näyte omaan Minigrip-pussiin imutyynyn kanssa.
2. Pakkaa pussit mielellään noin + 4 asteen kylmäpakkaukseen.
3. Pakkaa kylmäpakkaukseen keltamustaraidalliseen pahvilaatikkoon, sekä muovipussiin suljetut, täytetyt näytelähetteen.
4. Liimaa keltamustaraidalliseen pahvilaatikkoon tarrat: UN3373, BIOLOGINEN MATERIAALI, KATEGORIA B.

Lähettäjä maksaa postimaksun. HUOM! Posti Oy kuljettaa laatikot maksikirjeenä ILMAN pakettikorttia

## Posti ja laboratorionäytteiden lähettäminen

<https://www.posti.fi/yrityksille/asiakastuki/ohjeet/laboratorionaytteet>

<https://assets.ctfassets.net/dvxpcmq06s7e/52FZEOZ1MwyWGcNkFhmq5c/5e071fa7cc7239b53b1eb63b-1867b1ae/posti-laboratorionaytteiden-lahettaminen.pdf>

## Lähetysosoite

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL)  
Tutkimuskeskus Neulanen  
Virologia  
PL 95  
70701 Kuopio

## Yhteystiedot

Virologiset näytteet  
Puh. 029 524 6116

## Tulokset

Tulokset vastataan turvasähköpostilla.

## Asiakaspalaute

Toimintaamme koskevat palautteet pyydämme ilmoittamaan puhelimitse numeroon 029 524 6116.